




Brugsanvisning

Se også "General Warnings and Safety Instructions", Side 58-66

DK

Deres høreapparat.

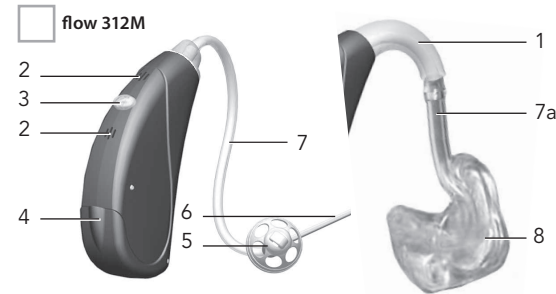

- 1 Bærekrog
- 2 Mikrofon/mikrofonbeskyttelse
- 3 Tast – til programvalg og/eller lydstyrkeændringer (afhængigt af den individuelle tilpasning)
- 3a Vippekontakt – til lydstyrkeændringer
- 4 Batteriskuffe
- 5 Dome (Olive)
- 6 Holder – forhindrer, at dommen og slangen glider ud af øregangen
- 7 slimtube (minislange)
- 7a Power slimtube – forbinder ørepuden med bærekrogen
- 8 Ørepude

Sidemarkering:

Rød markering = højre øre Blå markering = venstre øre.

Option: slimtube/Power slimtube

Option: fjernbetjening

- Fjernbetjeningens funktioner er beskrevet i en separat brugsanvisning.

Deres høreapparat: FCC ID:

beat 13/675	VMY-UWBTE2
beat SHD RS13	VMY-UWTM1
beat SHD RS675	VMY-UWTM1

Konformitet i henhold til direktiverne 93/42/EEC vedrørende medicoudstyr. 0124

Batteriskift.

Batteritype: **Batteriadvarselstone**

312

13

675

Når batteriet er næsten tomt, udsender dit høreapparat to lange signallyde. Høreapparatets lyd kvalitet forringes eventuelt efter den første advarselstone. Dette er ikke en fejl. Du kan løse problemet ved at isætte et nyt batteri. Hvis du ønsker det, kan din hørespecialist tilpasse tonehøjden og lydstyrken af batteriadvarselstone. Batteriadvarselstone kan også helt slås fra, hvis dette ønskes.

- Batteriskuffen åbnes.

- Batteriet lægges i, så plus vender opad.

- Luk batteri-skuffen.

- Efter at et nyt batteri er lagt i, kan det vare et par minutter, før det når sin fulde ydelse.

Tænd/sluk for høreapparatet.

1. Til:

- Luk batteriskuffen helt.

Bemærk: Hvis aktiveringsforsinkelsen er aktiveret, tændes dit høreapparat først fem sekunder efter lukning af batteriskuffen. Hvis det ønskes, kan din hørespecialist programmere denne aktiveringsforsinkelse individuelt.

2. Fra:

- Åbn batteriskuffen halvt.

3. Åbn:

- Åbn batteriskuffen for at udskifte batteriet.

Betjeningselement.

Med tast



Med vippekontakt



Med fjernbetjening

- Fjernbetjeningens funktioner er beskrevet i en separat brugsanvisning.

Programskift

Lydstyrkeindstilling: højre apparat – højere, venstre apparat – lavere

Vippekontakten kan anvendes til lydstyrkeindstilling.

Indstilling af lydstyrken.

Med tast

Når tasten til lydstyrkeindstilling er programmeret: Tryk på tasten på højre høreapparat for at øge lydstyrken i begge høreapparater. Tryk på tasten på venstre høreapparat for at sænke lydstyrken i begge høreapparater. Ved ændring af lydstyrken udsender dine høreapparater forskellige signallyde.

Med vippekontakt

- Når vippekontakten er programmeret som volumenkontrol, kan høreapparaternes lydstyrke indstilles via denne. Tryk vippekontakten for lydstyrke opad for at øge lydstyrken, og tryk den nedad for at sænke lydstyrken. Når du ændrer lydstyrken, udsender dit høreapparat signallyde.

Med fjernbetjening

- Fjernbetjeningens funktioner er beskrevet i en separat brugsanvisning.






Lydstyrkeindstilling	Signallyde
Optimal lydstyrke	1 tone
Højere	Kort tone
Lavere	Kort tone
Højeste lydstyrke	2 toner
Laveste lydstyrke	2 toner

Skift af høreprogram.



Med tast

- Med programtasten vælger De mellem de høreprogrammer, som er individuelt programmeret til Dem.
- Ved omskiftning signaliserer høresystemet med signallyde, hvilket program du har valgt.
- Du kan således tilpasse dit apparat til forskellige høresituationer.

Program 1 (f.eks. bilprogram)		1 tone
Program 2 (f.eks. tale i larm)		2 toner
Program 3 (f.eks. PhoneConnect)		3 toner
Program 4 (z.B. Musik)		4 toner
PhoneConnect		Kort melodi

Trådløs synkronisering (hvis aktiveret) I det andet høreapparat høres den samme tone som i det høreapparat, der indstilles



Med fjernbetjening

- Fjernbetjeningens funktioner er beskrevet i en separat brugsanvisning.

Høreprogram/Beskrivelse af høreprogrammet

1

2

3

4

Ekstrafunktioner.



Wireless synkronisering (BiLink)

- Med wireless synkronisering kan dine høreapparater kommunikere trådløst med hinanden. Hver gang du ændrer et program eller lydstyrken i det ene høreapparat, overføres denne ændring synkront til det andet høreapparat.
- Kontakt venligst din hørespecialist ved alle spørgsmål, der vedrører dit høreapparat.



Binaural telefon (BiPhone)

Med BiPhone-funktionen kan opkald fra fastnet- eller mobiltelefoner høres klart og tydeligt i begge ører uden ekstraudstyr. Tilbehør er ikke påkrævet.



Forsinket tænding

- tillader Dem at tænde høreapparaterne med en automatisk forsinkelse på 5, 10 eller 15 sekunder for at undgå tilbagekobling (hyletone).



Telespolen

Telespolen kan benyttes i kirker, teatre og foredragssale.




Tilslutning til eksterne audiokilder

Dine høreapparater kan være udstyret med ekstraudstyr i form af en direkte audioindgang (Direct Audio Input, DAI) for tilslutning af andre audiokilder som f.eks. stereoanlæg eller TV via et FM-system eller kabel.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om direkte audioindgang og tilslutningskabler, kan du henvende dig til din høreapparatspecialist.

Vedligeholdelse.

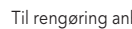

Ørepuder og slimtube

Til rengøring anbefaler vi HADEO-plejeprodukter, der er udviklet specielt til høreapparatet. HADEO-produkterne fås kun hos høreapparatforhandleren.

- Rengør høreapparaterne jævnligt for at forhindre beskadigelse af høreapparaterne samt for at undgå helseproblemer.



Ørepuder og slimtube

- Ved rengøring skal øreproppen og høreapparat adskilles og øreproppen lægges i HADEO rensesvæske i mindst 15 minutter.



Om nødvendig træk minislangen fra høreapparatet. Indfør rensetråden (fra høreapparatets side) fuldstændig i minislangen.

- Om nødvendig træk minislangen fra høreapparatet. Indfør rensetråden (fra høreapparatets side) fuldstændig i minislangen.

- Høreapparatet, slangen, højttaleren og domene/ørepunder må aldrig skylles med eller sænkes ned i vand, da vanddråber kan blokere lyden eller beskadige høreapparatets elektroniske komponenter. Rengør høreapparatet når det er tørt med en blød klud.
- Høreapparatet bør holdes tørt. Venligst læg det ind i en HADEO DryBox, HADEO tørrepose eller HADEO tørredåse natten over for at fjerne fugten indeni.

Tilbehør.

Fjernbetjening RCV1/2

Trådløs-funktionen på høresystemet muliggør programsift og lydstyrkeregulering på en fjernbetjening. Yderligere informationer kan fås hos høreapparatteknikeren eller i vejledningen for fjernbetjeningen.



uDirect 2/3, uTV3

uDirect 2/3 og uTV3 er ekstraudstyr til dine høreapparater. Du finder oplysninger om brugen af uDirect 2/3 og uTV3 i de tilhørende brugsvejledninger. Kontakt din hørespecialist, hvis du ønsker at købe en streamer eller uTV3.



PhoneConnect

Din hørespecialist har i givet fald konfigureret et telefonprogram, som du kan aktivere via den automatiske programomsiftning (PhoneConnect). Magnetnet på telefonen sørger for det nødvendige magnetfelt til at aktivere telefonprogrammet.



Din hørespecialist kan oprette en individuel brugsanvisning til dig.

Henvend dig med alle spørgsmål vedrørende dit høreapparat til din høreapparat specialist.

Fejlfinding.

De fleste opståede fejl kan hurtigt rettes ved hjælp af følgende råd. Hvis problemet ikke kunne løses ved hjælp af disse råd, kontaktes deres høreapparattekniker.

Problem	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ingen lyd	Ikke tændt. Batteri svagt/tomt. Batterikontakt utilstrækkelig. Batteri vender forkert. Ørepude/minislange/dome tilstoppet med ørevoks. Tilstoppet mikrofonbeskyttelse.	Tænd. Udskift batteriet. Kontakt din hørespecialist. Læg batteriet i med plussiden (+) opad. Rengør ørepuden/minislangen/domen. Kontakt din hørespecialist.

For lav lydstyrkeindstilling.

Lydstyrken er indstillet for lav.

Øg lydstyrken; kontakt din hørespecialist, hvis du har et høreapparat uden lydstyrkeindstilling og også, hvis problemet fortsætter.

Batteri svagt.
Ørepude/minislange/dome ikke indsat korrekt.
Tiltagende høretab.

Udskift batteriet.
Tag komponenten ud, og sæt den forsigtigt ind igen.
Kontakt din hørespecialist.

Ørepude/minislange/dome tilstoppet med ørevoks.
Tilstoppet mikrofonbeskyttelse.

Rengør ørepuden/minislangen/domen.
Kontakt din hørespecialist.

Ørepude/minislange/dome ikke indsat korrekt.

Tag komponenten ud, og sæt den forsigtigt ind igen.

For lav lyd ved telefonering.

Telefon ikke placeret korrekt.

Høreapparatet skal programmeres igen.

Problem	Mulige årsager	Mulige løsninger
Afbrydelser, apparatet sætter ud.	Batteri svagt. Snavset batterikontakt.	Udskift batteriet. Kontakt din hørespecialist.

To lange toner.	Batteri svagt.	Udskift batteriet.
-----------------	----------------	--------------------

Pibelyd.	Ørepude/minislange/dome ikke indsat korrekt. Hånd eller tøj i nærheden af øret. Ørepude eller dome sidder dårligt.	Tag komponenten ud, og sæt den forsigtigt ind igen. Fjern hånden/tøjet fra øret. Kontakt din hørespecialist.
----------	--	--

Utydelig, forvrænget lyd.	Ørepude/minislange/dome ikke indsat korrekt. Batteri svagt. Tilstoppet mikrofonbeskyttelse.	Tag komponenten ud, og sæt den forsigtigt ind igen. Udskift batteriet. Kontakt din hørespecialist.
---------------------------	---	--

Ørepuder/minislanger/dome glider ud af øret.	Ørepude/minislange/dome sidder dårligt. Ørepude/minislange/dome ikke indsat korrekt.	Kontakt din hørespecialist. Tag komponenten ud, og sæt den forsigtigt ind igen.
--	---	--

For lav lyd ved telefonering.	Telefon ikke placeret korrekt. Høreapparatet skal programmeres igen.	Flyt telefonen/telefonrøret lidt op og ned, indtil du finder positionen med den bedste overførsel. Kontakt din hørespecialist.
-------------------------------	---	---