





Οδηγίες χρήσεως

Βλ. επίσης "General Warnings and Safety Instructions", Σελίδα 41-50

GR

Το ακουστικό.

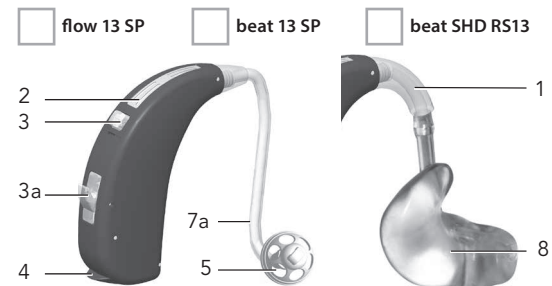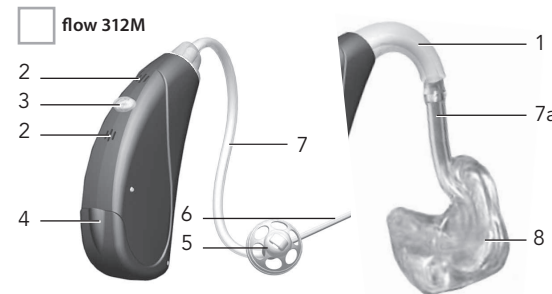

- 1 Άγκιστρο
- 2 Μικρόφωνο/προστατευτικό μικροφώνου
- 3 Κουμπί – για επιλογή προγράμματος ή/και αλλαγή της έντασης ήχου (ανάλογα με την εκάστοτε διαμόρφωση)
- 3a Πλήκτρο παλινδρόμησης – για αλλαγή της έντασης ήχου
- 4 Θήκη μπαταρίας
- 5 Dome (Ελιά)
- 6 Στήριγμα – αποτρέπει το γλιστρήμα της ελιάς και του εύκαμπτου σωλήνα από τον ακουστικό πόρο
- 7 slimtube (μίνι εύκαμπτος σωλήνας)
- 7a Power slimtube – συνδέει το τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί με το άγκιστρο
- 8 Τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί

Σήμανση πλευράς αυτιού:

Κόκκινο = δεξιά Μπλε = αριστερά

Επιλογή: slimtube/Power slimtube

Επιλογή: τηλεχειριστηρίου

- Οι λειτουργίες του τηλεχειρισμού περιγράφονται σε ξεχωριστές οδηγίες χρήσης.

Το ακουστικό:	FCC ID:
beat 13/675	VMY-UWBTE2
beat SHD RS13	VMY-UWTM1
beat SHD RS675	VMY-UWTM1

Δηλώνει τη συμμόρφωσή της με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών συσκευών.



Αλλαγή μπαταρίας.

Τύπος μπαταρίας:

- 312
 13
 675

Προειδοποιητικός τόνος μπαταρίας

Το σύστημα ακοής σας υποδεικνύει τη χαμηλή στάθμη της μπαταρίας με δύο παρατεταμένους τόνους σήματος. Μετά το πρώτο άκουσμα του προειδοποιητικού τόνου ενδεχομένως να μειωθεί η ποιότητα του ήχου του συστήματος ακοής. Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα. Μπορείτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα, αντικαθιστώντας την μπαταρία με μία καινούρια. Ο ακοομέτρης σας μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα με τις επιθυμίες σας την ένταση του τόνου και του ήχου του προειδοποιητικού τόνου της μπαταρίας. Εάν θέλει μπορεί και να τον απενεργοποιήσει τελείως.

- Ανοίξτε τη μπαταριοθήκη.

- Τοποθετήστε τη μπαταρία στην ανοικτή θήκη, ώστε ο αρνητικός πόλος να δείχνει προς το εσωτερικό του χώρου μπαταριών.

- Κλείστε τη μπαταριοθήκη.

- ! Αν η μπαταρία είναι καινούρια, μπορεί να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρις ότου αυτή αναπτύξει την πλήρη ισχύ της. Τότε μόνο κλείστε τη μπαταριοθήκη.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ακουστικού.

1. Ενεργοποίηση:

- Κλείστε τελείως τη θήκη της μπαταρίας.

Υπόδειξη: Εάν είναι ενεργοποιημένη η καθυστέρηση ενεργοποίησης, το σύστημα ακοής ενεργοποιείται 5 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο της θήκης μπαταρίας. Ο ακοομέτρης σας μπορεί να προσαρμόσει την καθυστέρηση ενεργοποίησης στις ανάγκες σας.

2. Απενεργοποίηση:


- Ανοίξτε λίγο τη θήκη μπαταρίας.

3. Ανοίγμα:

- Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία.

Χειριστήριο.

Με κουμπί

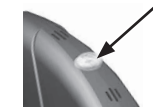

Με πλήκτρο παλινδρόμησης



Μέσω τηλεχειριστηρίου

- Οι λειτουργίες του τηλεχειρισμού περιγράφονται σε ξεχωριστές οδηγίες χρήσης.

Αλλαγή προγράμματος

Ρύθμιση έντασης ήχου: δεξιά συσκευή - πιο ψηλά, αριστερή συσκευή – πιο χαμηλά

Το πλήκτρο παλινδρόμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της έντασης ήχου.

↑ πιο ψηλά
↓ πιο χαμηλά

Ρύθμιση ακουστικής έντασης.

Με κουμπί

Εάν το κουμπί προγραμματίστηκε για τη ρύθμιση της έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί στο δεξί σύστημα ακοής για να αυξήσετε την ένταση ήχου και στα δύο συστήματα ακοής. Πατήστε το κουμπί στο αριστερό σύστημα ακοής για να μειώσετε την ένταση ήχου και στα δύο συστήματα ακοής. Σε περίπτωση αλλαγής της έντασης ήχου τα συστήματα ακοής σας εκπέμπουν διαφορετικούς τόνους σήματος.

Με πλήκτρο παλινδρόμησης

- Εάν το πλήκτρο παλινδρόμησης προγραμματίστηκε ως ρυθμιστής έντασης ήχου, μπορείτε να αλλάξετε με αυτό την ένταση ήχου των συστημάτων ακοής. Πιέστε το πλήκτρο παλινδρόμησης προς τα πάνω για να αυξήσετε την ένταση ήχου και προς τα κάτω για να τη μειώσετε. Όταν αλλάζετε την ένταση ήχου, το σύστημα ακοής σας εκπέμπει τόνους σήματος.

Μέσω τηλεχειριστηρίου

- Οι λειτουργίες του τηλεχειρισμού περιγράφονται σε ξεχωριστές οδηγίες χρήσης.

Ρύθμιση έντασης ήχου	Τόνοι σήματος
Ιδανική ένταση ήχου	🎵 1τόνος
Πιο ψηλά	🎵 Σύντομος τόνος
Πιο χαμηλά	🎵 Σύντομος τόνος
Μέγιστη ένταση ήχου	🎵🎵 2 τόνοι
Ελάχιστη ένταση ήχου	🎵🎵 2 τόνοι

Αλλαγή προγραμμάτων ακοής.


Με κουμπί


- Με το κουμπί μπορείτε να επιλέγετε μεταξύ των προγραμμάτων ακοής.
- Κατά την αλλαγή το ακουστικό σας σύστημα σας δείχνει με χαρακτηριστικούς ήχους σήματος, ποιο πρόγραμμα επιλέξατε.
- Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή σας στις εκάστοτε ακουστικές συνθήκες.

Πρόγραμμα 1 (π.χ. αυτόματο πρόγραμμα)  1 τόνος

Πρόγραμμα 2 (π.χ. ομιλία σε θορυβώδες περιβάλλον)  2 τόνοι

Πρόγραμμα 3 (π.χ. PhoneConnect)  3 τόνοι

Πρόγραμμα 4 (π.χ. μουσική)  4 τόνοι

PhoneConnect  Σύντομη μελωδία

Ασύρματος συγχρονισμός (εάν είναι ενεργοποιημένος) Στο άλλο σύστημα ακοής ακούγεται ο ίδιος τόνος όπως στο σύστημα ακοής που ρυθμίζεται.

Μέσω τηλεχειριστηρίου

- Οι λειτουργίες του τηλεχειρισμού περιγράφονται σε ξεχωριστές οδηγίες χρήσης.

Πρόγραμμα ακοής/Περιγραφή προγράμματος ακοής

1

2

3

4

Προαιρετικές λειτουργίες.

Ασύρματος συγχρονισμός (BiLink)

- Με τον ασύρματο συγχρονισμό τα συστήματα ακοής σας μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ασύρματα. Κάθε φορά που αλλάξετε ένα πρόγραμμα ή την ένταση ήχου σε ένα σύστημα ακοής, αυτή η αλλαγή πραγματοποιείται συγχρόνως και στο άλλο σύστημα ακοής.
- Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας για όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με το σύστημα ακοής σας.

Αμφιωτικό τηλέφωνο (BiPhone)

Με τη λειτουργία για αμφιωτικές κλήσεις μπορείτε να ακούτε καθαρά και χωρίς πρόσθετες συσκευές και με τα δύο αυτιά κλήσεις από το σταθερό ή το κινητό σας τηλέφωνο. Δεν απαιτείται κανένα παρελκόμενο για τον σκοπό αυτό.

Καθυστέρηση ενεργοποίησης

- υνατότητα ενεργοποίησης των ακουστικών με αυτόματη καθυστέρηση 5, 10 ή 15 δευτερολέπτων, για την αποφυγή ηχητικών παρασίτων (σφύριγμα).

Πηνίο του τηλεφώνου

Το πηνίο του τηλεφώνου δίνει τη δυνατότητα μιας επαγωγικής κλήσης σήματος (για παράδειγμα κατά την τηλεφωνική επικοινωνία). Η λήψη ήχου μέσω μικροφώνου μειώνεται και πέφτει η έντασή της.

Σύνδεση σε εξωτερικές πηγές ήχου

Τα συστήματα ακοής σας μπορεί να διαθέτουν μια προαιρετική είσοδο ήχου (Direct Audio Input, DAI) για τη σύνδεση σε άλλες πηγές ήχου, όπως π.χ. στερεοφωνικές εγκαταστάσεις ή τηλεοράσεις μέσω ενός συστήματος FM ή καλωδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απευθείας είσοδο ήχου και τα καλώδια σύνδεσης απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας.

Υποδείξεις φροντίδας.

Για τον καθαρισμό σας προτείνουμε τα δικά μας προϊόντα περιποίησης HADEO, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη συσκευή ακοής σας. Τα προϊόντα HADEO μπορείτε να βρείτε μόνο στον τεχνικό σας για τις συσκευές ακοής.

- Καθαρίζετε τακτικά τα ακουστικά, για να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης και τυχόν προβλήματα υγείας.

Τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί και slimtube

Για να καθαρίσετε διαχωρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα ήχου από το σύστημα και βάλτε το στοιχείο ακοής τουλάχιστον για 15 λεπτά στο μπάνιο καθαρισμού HADEO.

Εν ανάγκη διαχωρίστε το ακουστικό σύστημα και το άνοιγμα σωλήνα (μικρός ελαστικός σωλήνας). Σύρετε το σύρμα καθαρισμού (από την πλευρά του ακουστικού συστήματος) πλήρως μέσω του ανοίγματος σωλήνα (μικρός ελαστικός σωλήνας).

Το ίδιο το σύστημα ακοής, ο εύκαμπτος σωλήνας, το ακουστικό και η ελιά ή τα τεμάχια προσαρμογής στο αυτί δεν επιτρέπεται να πλένονται ποτέ ούτε να βουτιούνται στο νερό, επειδή οι σταγόνες του νερού μπορεί να μπλοκάρουν τον ήχο ή να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του συστήματος ακοής. Καθαρίζετε τα ακουστικά σας με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα.

• Παρακαλούμε βάλτε το κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια αποθηκευτική σακούλα στεγνώματος HADEO, HADEO-DryBox ή στη θήκη στεγνώματος HADEO για να αφαιρέσετε την υγρασία από το εσωτερικό του ακουστικού.

Εξαρτήματα.

Το τηλεχειριστήριό σας RCV1/2

Η ασύρματη λειτουργία του συστήματος ακουστικών σας βοηθά να εκτελείτε αλλαγές προγράμματος και έντασης ήχου με τηλεχειρισμό. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στον ακοοπροθετιστή σας ή στις οδηγίες για τον τηλεχειρισμό.



uDirect 2/3, uTV3

Τα uDirect 2/3 και uTV3 είναι προαιρετικά παρελκόμενα για τα συστήματα ακοής σας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των uDirect 2/3 και uTV3 στις εκάστοτε οδηγίες χρήσης. Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας, εάν θέλετε να αποκτήσετε ένα Streamer ή uTV3.

PhoneConnect

Ο ακοομέτρης σας έχει ενδοχόμενες ρυθμίσει ένα πρόγραμμα τηλεφώνου, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της αυτόματης αλλαγής προγράμματος (PhoneConnect. Ο μαγνήτης στο τηλέφωνο παρέχει το απαιτούμενο μαγνητικό πεδίο για την ενεργοποίηση του προγράμματος τηλεφώνου.

Ο ακοομέτρης σας μπορεί να φτιάξει τις προσωπικές σας οδηγίες χρήσης.

Παρακαλούμε για όποιες απορίες έχετε σχετικά με τα ακουστικά σας να απευθύνεστε στον ειδικό ακοοπροθετιστή σας.

Εξαρτήματα.

Προβλήματα που προκύπτουν κατά κανόνα μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα με τις επόμενες υποδείξεις. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τη βοήθεια αυτών των προτάσεων, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανές λύσεις
Χωρίς τόνο.	Μη ενεργοποιημένο. Μπαταρία αδύναμη/άδεια. Μη επαρκής επαφή της μπαταρίας. Η μπαταρία έχει τοποθετηθεί λανθασμένα. Φραγμένο με κερί τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί/ μίνι εύκαμπτος σωλήνας/ ελιά. Φραγμένο προστατευτικό μικροφώνου.	Ενεργοποιήστε. Αντικαταστήστε την μπαταρία. Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας. Τοποθετήστε τη μπαταρία με τον θετικό πόλο (+) προς τα πάνω. Καθαρίστε το τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί/ τον μίνι εύκαμπτο σωλήνα/ την ελιά. Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας.

Πολύ χαμηλή ρύθμιση έντασης ήχου.

Η ένταση ήχου έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.

Αδύναμη μπαταρία.

Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Λανθασμένα τοποθετημένο τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί/μίνι εύκαμπτος σωλήνας/ελιά.
Αύξηση της απώλειας ακοής.
Φραγμένο με κερί τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί/μίνι εύκαμπτος σωλήνας/ελιά.
Φραγμένο προστατευτικό μικροφώνου.

Αφαιρέστε και ξανατοποθετήστε προσεκτικά.
Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας.
Καθαρίστε το τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί/ την ελιά.
Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας.

Διακοπές, η συσκευή σταματά.

Αδύναμη μπαταρία.

Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανές λύσεις
Δύο παρα-τεταμένοι τόνοι.	Αδύναμη μπαταρία.	Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας.
Σφύριγμα.	Το τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί/ο μίνι εύκαμπτος σωλήνας/η ελιά δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Χέρι ή ρούχο κοντά στο αυτί. Φραγμένο προστατευτικό μικροφώνου.	Αφαιρέστε και ξανατοποθετήστε προσεκτικά. Απομακρύνετε το χέρι/ρούχο από το αυτί. Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας.
Μη καθαρός, παραμορφωμένος ήχος.	Λανθασμένα τοποθετημένο τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί/μίνι εύκαμπτος σωλήνας/ελιά. Αδύναμη μπαταρία.	Αφαιρέστε και ξανατοποθετήστε προσεκτικά. Αντικαταστήστε την μπαταρία.
	Φραγμένο προστατευτικό μικροφώνου.	Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας.
Τα τεμάχια προσαρμογής στο αυτί, οι μίνι εύκαμπτοι σωλήνες ή οι ελιές γλιστρούν από το αυτί.	Κακή εφαρμογή του τεμαχίου προσαρμογής στο αυτί/του μίνι εύκαμπτου σωλήνα/της ελιάς. Λανθασμένα τοποθετημένο τεμάχιο προσαρμογής στο αυτί/μίνι εύκαμπτος σωλήνας/ελιά.	Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας. Αφαιρέστε και ξανατοποθετήστε προσεκτικά.

Χαμηλή ένταση κατά τις τηλεφωνικές κλήσεις

Το τηλέφωνο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Μετακινήστε το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω-κάτω μέχρι να βρείτε τη θέση με την καλύτερη μετάδοση. Απευθυνθείτε στον ακοομέτρη σας.