


## Votre système auditif.


### Pleine conque

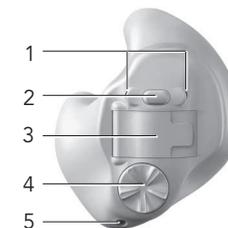

### Demi-conque



### Canal

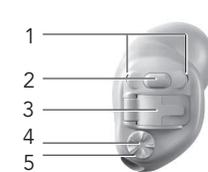

### Mini Canal



### CIC



### IIC



jamHD  jam

flow 2

- Microphone** – le son s'introduit dans vos systèmes auditifs par les microphones.
- Bouton poussoir** – permet de passer d'un programme d'écoute à un autre ou de régler le volume, selon votre appareillage sur mesure (selon votre appareillage sur mesure).
- Couvercle du compartiment à pile (marche/arrêt)** – fermez le couvercle du compartiment à pile pour mettre en marche les systèmes auditifs, ouvrez complètement le couvercle pour les arrêter ou pour remplacer la pile. Pour remplacer la pile, ouvrez complètement le couvercle pour accéder à son compartiment.
- Bouton rotatif** – permet de contrôler le volume (selon votre appareillage sur mesure)
- Évent** – réduit l'effet d'occlusion et améliore la qualité de votre voix
- Manette de retrait** – facilite le retrait de très petites systèmes auditifs du conduit auditif

#### Identification latérale de l'appareil :

Un repère en couleur vous permet d'identifier l'oreille pour laquelle le système auditif a été optimisé.

**Repère rouge** = oreille droite **Repère bleu** = oreille gauche

#### Option : Télécommande

- Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode d'emploi séparé.

Système auditif :	FCC ID:	IC ID:
jamHD 13, 312	VMY-UWITE2	2756A-UWITE2
jamHD 10A	VMY-UWITE3	2756A-UWITE3
jamHD 10A omni	VMY-UWITE4	2756A-UWITE4
jam	VMY-UWITE1	2756A-UWITE1
flow 2	-	-

Conformité selon directives 93/42/EWG relative aux dispositifs médicaux



## Remplacement de la pile.



#### Avertissement de pile faible

Deux bips longs indiquent que la pile du système auditif est faible. Après cet avertissement de pile faible, le son risque de ne pas être aussi clair. Cette situation est normale et peut être résolue en changeant les piles des systèmes auditifs. Si vous ne parvenez pas à entendre l'avertissement de pile faible, votre professionnel de l'audition peut changer la tonalité et l'intensité de l'avertissement. Si vous préférez, cette fonction peut être désactivée.

- Ouvrez le compartiment de la pile.



- Insérez-y celle-ci de telle sorte que le **pôle négatif** soit dirigé vers l'intérieur du compartiment.

- Refermez le tiroir.





- Lors de la mise en place d'une pile neuve peuvent s'écouler quelques minutes avant qu'elle n'ait déployé toute son énergie. Fermer alors seulement le compartiment (≈ 1 minute).**

## Mettre en place et retirer votre appareil.

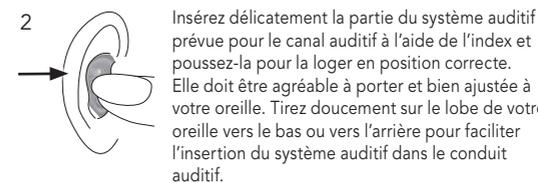
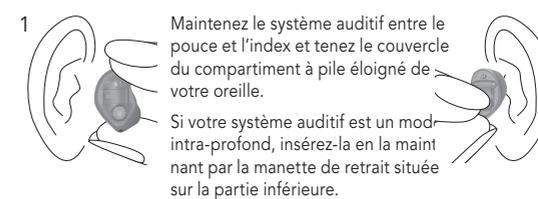


#### Retrait du système auditif :

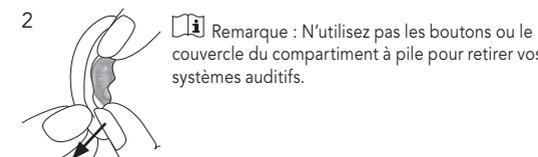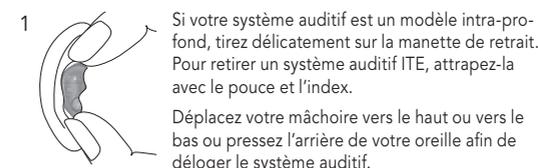

## Marche et arrêt des systèmes auditifs.

Le couvercle du compartiment à pile sert d'interrupteur marche/arrêt et permet d'accéder à la pile de vos systèmes auditifs.

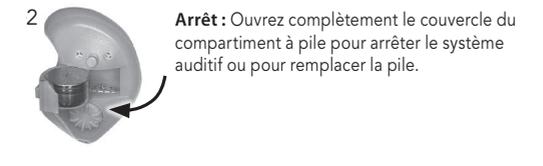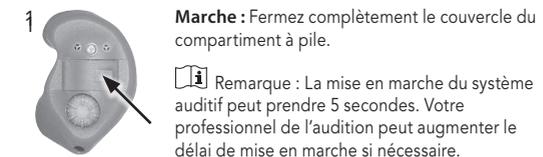

## Réglage du volume.

Vos systèmes auditifs peuvent être équipés de deux boutons permettant d'affiner leur réglage, ainsi que d'un bouton rotatif et d'un bouton-poussoir. Les systèmes auditifs IIC peuvent également être dotés d'une télécommande IIC.

#### Avec bouton rotatif

Si le bouton rotatif a été configuré pour régler le volume :

- Tournez le bouton lentement vers l'avant, en direction de votre nez, pour augmenter le volume.
- Tournez le bouton lentement vers l'arrière pour diminuer le volume.



#### Avec bouton-poussoir

Si le bouton-poussoir a été configuré pour le contrôle du volume :

- Appuyez sur le bouton de votre système auditif droit pour augmenter le volume dans les deux systèmes auditifs.
- Appuyez sur le bouton de votre système auditif gauche pour diminuer le volume dans les deux systèmes auditifs.



#### Avec télécommande

- Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode d'emploi séparé.

Réglage du volume	Bips
Volume conseillé	1 bip
Augmenter le volume	1 bip court
Diminuer le volume	1 bip court
Volume maximal	2 bips
Volume minimal	2 bips

## Changement de programme d'écoute.

### Avec bouton-poussoir

- Utiliser le bouton-poussoir pour choisir l'un des programmes sélectionnés individuellement pour vous.
- Lorsque vous passez d'un programme à l'autre, votre système auditif vous indique le programme sélectionné par l'intermédiaire de bips sonores.
- Vous pouvez adapter votre appareil à chaque situation sonore.

Programme 1 (par ex. Auto Program)	1 bip
Programme 2 (par ex. parole en environnement bruyant)	2 bips
Programme 3 (par ex. PhoneConnect)	3 bips
Programme 4 (par ex. musique)	4 bips
PhoneConnect	mélodie courte

Wireless synchronisation (si fonction activée) Le système auditif de l'oreille opposée émet un bip, tout comme celui étant ajusté.

### Avec télécommande

- Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode d'emploi séparé.

#### Programme d'écoute/Description du programme d'écoute

1

2

3

4

## Fonctionnalités en option.

### Wireless synchronisation (BiLink)

- Si la fonction wireless synchronisation est activée, les réglages du volume ou du programme sur un système auditif seront automatiquement appliqués à l'autre système auditif.
- Merci de vous adresser à votre professionnel de l'audition pour toutes les questions concernant votre système auditif.

### Programme téléphonique binaural (BiPhone)

Le programme téléphonique binaural vous permet de tenir le combiné contre une oreille et d'entendre le son clairement, dans les deux oreilles. Aucun accessoire n'est nécessaire.

### Mise en route retardée

- Ce dispositif vous permet d'allumer vos systèmes auditifs avec un retard automatique de 5, 10 ou 15 secondes afin d'éviter les sifflements.

### Bobine téléphonique

La bobine téléphonique permet le traitement d'un signal inductif (par exemple au téléphone). La captation du son à l'aide du microphone est réduite ou supprimée, dans ce cas.



### Gestionnaire des acouphènes (Tinnitus Manager)

Si votre professionnel de l'audition a configuré à la fois un programme de gestionnaire d'acouphènes et un contrôle du volume, vous pouvez régler le niveau du gestionnaire d'acouphènes lorsque vous êtes dans le programme de masquage.

### Programme automatique pour le téléphone

● Approchez un combiné téléphonique de votre système auditif. Le système auditif bascule automatiquement sur le programme téléphone. Eloignez le combiné de votre système auditif. Le système auditif rebasculera sur le programme précédemment utilisé.

 Tous les téléphones ne produisent pas un champ magnétique suffisamment fort pour activer la fonction PhoneConnect. Si tel est le cas, utilisez l'aimant PhoneConnect fourni avec vos systèmes auditifs.

● Attachez le au récepteur de votre téléphone pour activer la fonction PhoneConnect.

 Lorsque le système auditif est utilisée en mode bobine téléphonique, la fonction sans fil peut provoquer un bruit pulsé. Cela est dû au fait que le signal de transmission est capté par la bobine téléphonique du système auditif.

● Lorsque votre système auditif est en mode bobine téléphonique, utilisez la télécommande à une distance supérieure à 10 cm (4 pouces).

### Accessoires.

#### Télécommande RCV1/2

La fonction wireless de vos systèmes auditifs vous permet de changer le programme et le volume sonore avec une télécommande. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre professionnel de l'audition ou en consultant les manuels de la télécommande.



#### uDirect 2/3, uStream, uTV3

L'uDirect 2/3, uStream et l'uTV3 sont des accessoires en option pour les systèmes auditifs. Pour plus d'informations sur l'utilisation des accessoires uDirect 2/3, uStream et l'uTV3, veuillez consulter le guide de l'utilisateur correspondant. Pour savoir comment vous procurer les accessoires uDirect 2/3, uStream et l'uTV3, veuillez contacter votre professionnel de l'audition.

### PhoneConnect

Le cas échéant, votre audioprothésiste a configuré un programme dédié au téléphone, auquel vous accédez via le changement de programme automatique (PhoneConnect). L'aimant au niveau du téléphone fournit le champ magnétique nécessaire à l'activation du programme dédié au téléphone.



Votre professionnel de l'audition peut vous élaborer votre mode d'emploi personnel.

### Télécommande IIC

La télécommande IIC contient un aimant qui fonctionne comme une télécommande pour changer les réglages de votre IIC. Votre IIC, combiné à la télécommande micro CIC, peut être configuré pour :

**changer de programme**  
**augmenter/diminuer le volume**

Pour utiliser la télécommande IIC, dévissez l'aimant du cache et maintenez-le à l'intérieur du conduit auditif sans toucher le système auditif.

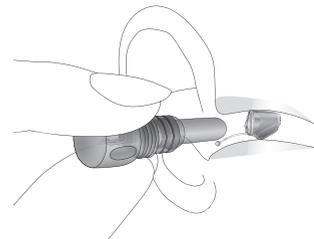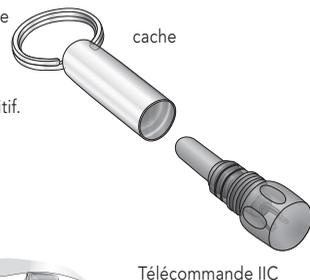

● **Merci de vous adresser à votre professionnel de l'audition pour toutes les questions concernant votre système auditif.**

### Conseils d'entretien.


Pour le nettoyage de votre système auditif nous vous conseillons notre gamme de produits d'entretien HADEO, spécialement adaptée à votre système auditif. Les produits HADEO sont uniquement disponibles chez votre professionnel de l'audition.

● Ne jamais mettre l'appareil auditif dans de l'eau ni dans un produit liquide de nettoyage.

● Le système auditif doit être conservés à sec. Placez-le dans un HADEO DryBox, un sac ou une boîte de séchage HADEO pendant la nuit afin d'en éliminer toute l'humidité.

● Nettoyez l'appareil auditif à sec (de préférence le matin) avec un chiffon doux.

● Il est possible de nettoyer les entrées micro et écouteur avec une petite brosse (lorsque l'appareil est sec) et ainsi sup-primer les impuretés (ne jamais utiliser d'objet pointu).

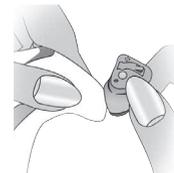

### Manuel d'entretien

Vous obtiendrez une documentation sur la gamme HADEO chez votre professionnel de l'audition, qui pourra également vous conseiller sur l'entretien de votre système auditif.



### Recherche d'erreurs.

Il sera souvent possible de régler les problèmes rencontrés au moyen des indications suivantes. Si ces indications ne vous permettent pas de résoudre le problème, veuillez vous adresser à votre audioprothésiste.

Problème	Cause possible	Solutions possibles
Aucun son.	Pas allumé.	Mettez l'appareil en marche.
	Pile faible ou complètement déchargée.	Remplacez la pile.
	Mauvais contact de la pile. Pile à l'envers.	Consultez votre professionnel de l'audition. Insérez la pile avec le signe plus (+) vers le haut.
Systèmes auditifs obstructués par du cérumen.		Consultez votre professionnel de l'audition.
Volume insuffisant.	Volume faible.	Augmentez le volume ; consultez un audioprothésiste pour les modèles dépourvus de bouton de contrôle du volume manuel ou si le problème persiste.
	Pile faible. Systèmes auditifs non insérés correctement. Changement dans l'audition. Systèmes auditifs obstructués par du cérumen.	Remplacez la pile. Retirez-les et remettez-les en place. Consultez votre professionnel de l'audition. Consultez votre professionnel de l'audition.
Intermittence.	Pile faible. Contact de pile sale.	Remplacez la pile. Consultez votre professionnel de l'audition.
Deux bips longs.	Pile faible.	Remplacez la pile.

Problème	Cause possible	Solutions possibles
Sifflement.	Systèmes auditifs non insérés correctement. Main/vêtement proche de l'oreille.	Retirez-les et remettez-les en place. Éloignez votre main/vêtement de votre oreille.
	Mauvaise mise en place des systèmes auditifs.	Consultez votre professionnel de l'audition.
Manque de clarté, distorsion.	Mauvaise mise en place des systèmes auditifs. Systèmes auditifs obstructués par du cérumen. Pile faible.	Consultez votre professionnel de l'audition. Consultez votre professionnel de l'audition. Remplacez la pile.
Faible au téléphone.	Volume faible. Téléphone mal positionné.	Augmentez le volume. Déplacez le téléphone sur l'oreille pour obtenir un signal plus net.
	Le système auditif nécessite d'être ajustée.	Consultez votre professionnel de l'audition.



jam  
jamHD  
flow

Mode d'emploi

Voir aussi "General Warnings and Safety Instructions", Page 21-31