

TV Connector kullanıcı kılavuzu



| Easy Line™ |
Accessories



Teşekkür ederiz

TV Connector'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
TV Connector'un kullanım amacı, işitme cihazlarınızı doğrudan TV veya ses kaynağınıza bağlamaktır.

TV Connector ürününüz

İşitme sağlığı bakım uzmanı: _____

Telefon: _____

TV Connector seri numarası: _____


Garanti: _____

Satın alma tarihi: _____


Ambalaj içeriđi

TV Connector ambalajında řunlar yer alır:


TV Connector

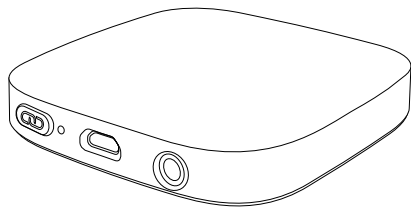

Analog 3,5 mm ses kablosu
(TV Connector'a önceden takılıdır)

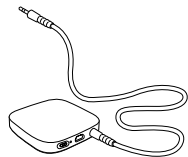


Mikro USB kablosu

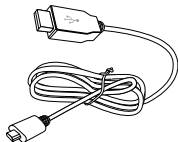

Optik (TOSLINK) ses kablosu



Güç kaynađı

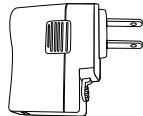


İçindekiler Tablosu

TV Connector açıklaması.....	2
Tek bakışta TV Connector.....	3
Başlarken	4
Adım 1: Güç kaynađını ayarlama.....	4
Adım 2: Güç kaynađını bağlama.....	5
Adım 3: Ses kaynađına bağlama	7
Adım 4: TV Connector'ı işitme cihazlarınıza bağlama.....	10
TV Connector'ın günlük kullanımı	12
Televizyonunuz ve ortamınız arasındaki ses dengesini ayarlama.....	14
TV Connector ve telefon çağrıları	15
Ses aktarımını kapatma	15
LED gösterge ışığını anlama	16
Sorun giderme kılavuzu	17
Uyarılar.....	20
Ürün güvenliđiyle ilgili bilgiler.....	22
Bilgi ve sembol açıklamaları	24
Uyumluluk bilgileri.....	26
Ek notlar	31

TV Connector açıklaması


TV Connector, işitme cihazlarınızı doğrudan TV veya diğer ses kaynaklarınıza kablosuz olarak bağlamanıza olanak tanır. Kablosuz olarak 15 m uzaklığa kadar ses sinyalleri gönderir. TV Connector yalnızca uyumlu işitme cihazı modelleriyle kullanılabilir. Daha fazla bilgi için işitme sağlığı bakım uzmanınıza danışın.

İşitme cihazı

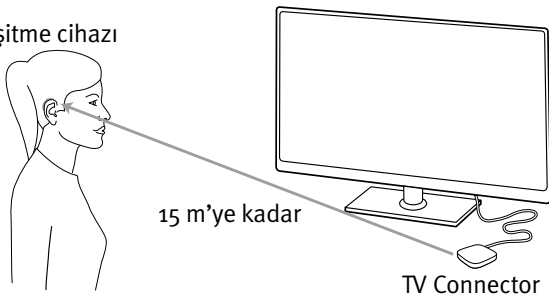

- ① İşitme cihazlarınız ile TV Connector arasında görüş açısı olması zorunlu değildir. Ancak duvar ve mobilya gibi engeller çalışma menzili azaltabilir.

Tek bakışta TV Connector

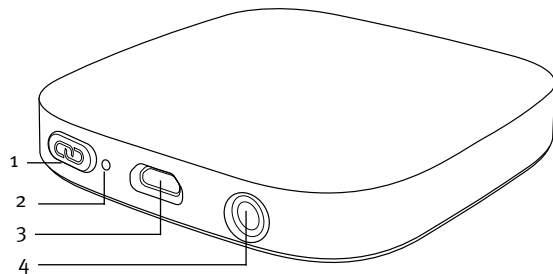


- 1 Bağlan tuşu
- 2 LED gösterge ışığı
- 3 Mikro USB güç bağlantı noktası
- 4 Ses bağlantı noktası:
 - Optik (TOSLINK) ses kablosu
 - Analog 3,5 mm ses kablosu

Başlarken

Adım 1: Güç kaynağını ayarlama

Ülke adaptörünü takmak için:

1. Ülkenize uygun adaptörü seçin. (Paketteki ülke adaptörleri ülkeye göre farklılık gösterebilir.)

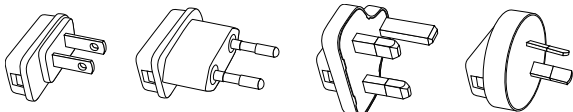


ABD

AB

BK

AVUS


2. Adaptörün yuvarlak köşesini, evrensel güç kaynağının yuvarlak köşesine tamamen oturana kadar itin.

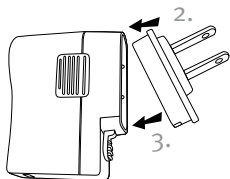

3. Klik sesi duyulduğunda adaptörün kuyruğu yerine oturmuştur. Adaptörün sıkıca kilitlendiğinden emin olun.


Ülke adaptörünü çıkarmak için:

1. Evrensel güç kaynağının tırnağını geri çekip basılı tutun.
2. Adaptörü yukarı doğru hafifçe çekerek prizden çıkarın.

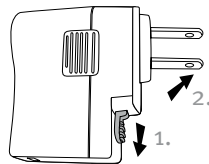


Adım 2: Güç kaynağını bağlama


1. USB kablosunun büyük ucunu güç kaynağına takın.
2. Güç kaynağını elektrik prizine takın.

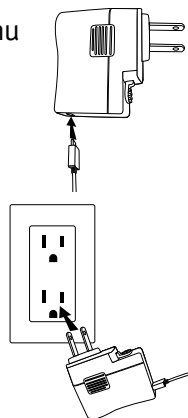

3. USB kablosunun küçük ucunu TV Connector'ın mikro USB güç bağlantı noktasına takın.

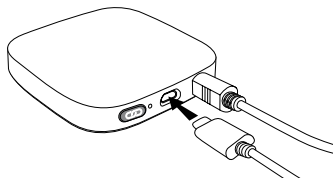


TV Connector'ı USB kablosu ile çalıştırmak için USB kablosunun büyük ucunu TV'nin USB bağlantı noktasına da takabilirsiniz.

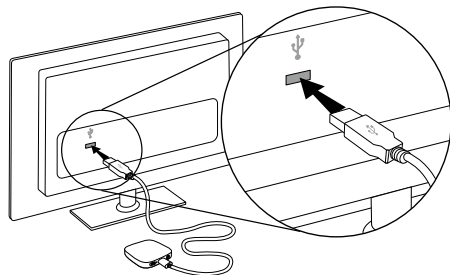

- ① TV Connector ilk kez bir güç kaynağına bağlandığında, işleme cihazı ile otomatik olarak bağlantı kurulur. Bağlantı başarılı olduğunda işleme cihazları bir onay müziği çalar.

Adım 3: Ses kaynağına bağlama


TV Connector TV, bilgisayar veya ses sistemi gibi herhangi bir ses kaynağına bağlanabilir. İki farklı ses kablosu girişini destekler: optik (TOSLINK) veya analog. Bu ses kablolarının her biri, TV Connector üzerindeki ilgili ses bağlantı noktasına takılmalıdır.

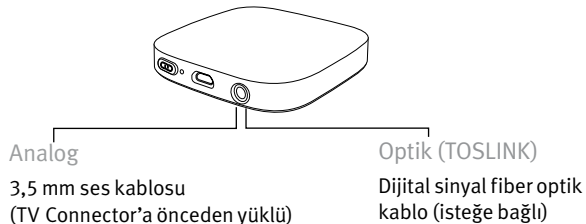

- ① Ses kaynağınızla uyumlu ses kablosunu seçin.
- ① Seçtiğiniz ses kablosunun hem TV Connector'a hem de ses kaynağına sıkıca takıldığından emin olun.

Analog kablo ile bağlama


Analog 3,5 mm ses kablosunun boştaki ucunu TV'nizin (veya ses kaynağınızın) AUDIO OUT bağlantı noktasına takın.

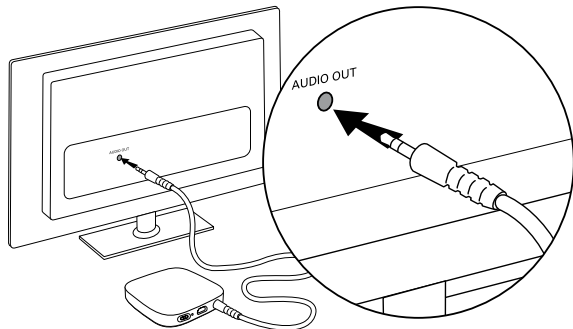

- ① Analog 3,5 mm ses kablosu bağlandığında TV'nizin hoparlörleri kapanıyorsa bu kablo yerine optik ses kablosunu kullanın (bkz. İsteğe bağlı: Optik kablo ile bağlama).

İsteğe Bağlı: Optik kablo ile bağlama

Ürünle birlikte verilen analog 3,5 mm ses kablosunu optik (TOSLINK) kablo ile değiştirin. Optik kablonun büyük ucunu TV Connector'a, küçük ucunu ise TV'nizin (veya ses kaynağının) OPTICAL DIGITAL AUDIO OUTPUT yuvasına takın.

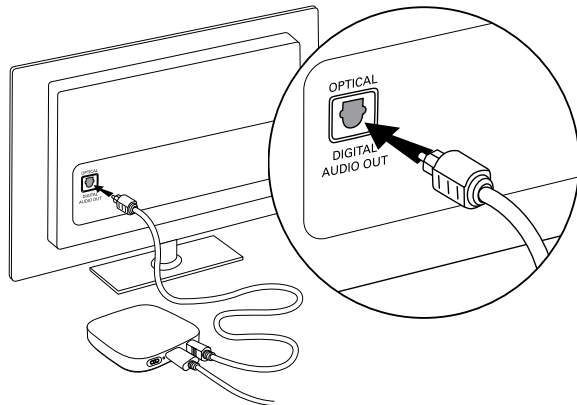


Adım 4: TV Connector'ı işitme cihazlarınıza bağlama

- ① TV Connector ilk kez bir güç kaynağına bağlandığında, işitme cihazı ile otomatik olarak bağlantı kurulur. Bağlantı başarılı olduğunda işitme cihazları bir onay müziği çalar.

Yeni işitme cihazlarını TV Connector'a bağlamak için:

- TV  düğmesine bastığınızda LED gösterge ışığı mavi renkte yanıp sönmeye başlar.

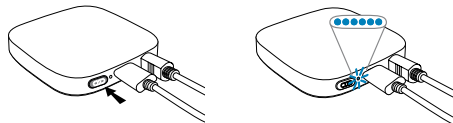

- İşitme cihazlarının açık ve TV Connector'a en fazla 1 m mesafede olduğundan emin olun.


- Bağlantı başarılı olduğunda işitme cihazları bir onay müziği duyarsınız. Bu müzik 10 saniyeye kadar sürebilir.



- ① TV Connector, bağlantı işlemi sırasında kapsama alanında bulunan tüm uyumlu işitme cihazlarına bağlanır. İlk bağlantı işleminden sonra işitme cihazları TV Connector kullanılabilir olduğunda bunu otomatik olarak algılar.

TV Connector'ın günlük kullanımı

TV'nizi veya ses kaynađınızı açın. TV Connector, ses sinyali ni iřitme cihazlarına otomatik olarak iletir.

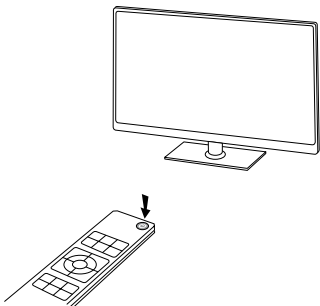

- ① İřitme cihazlarınızdan birindeki düğmeye basarak gelen ses sinyali ni kabul etmeniz gerekebilir.



Sesi doğrudan iřitme cihazlarınızdan duyarsınız.

- ① Ses giriři olmadığında TV Connector iřitme cihazlarına ses aktarımını otomatik olarak durdurur. LED göstergesi sabit kırmızıdır (bekleme modu).
- ① TV Connector yalnızca mono veya stereo ses sinyallerini alıp aktarabilir. Lütfen TV'nin (veya ses kaynađının) herhangi bir Dolby Digital veya DTS ses ayarı kullanmadığından emin olun. Bu ses sinyalleri mevcutsa TV Connector üzerindeki LED göstergesi kırmızı renkte yanıp söner. Lütfen TV veya ses kaynađının ses ayarları menüsünden ses sinyali ni stereo (PCM) olarak deđiřtirin. Alternatif olarak, analog 3,5 mm ses kablosuna geçin.


İřitme cihazları TV Connector kapsama alanının dışında kaldığında TV programından çıkıř yapar. İřitme cihazları TV Connector kapsama alanına yeniden girdiğinde ses sinyali yayını otomatik olarak devam eder.

- ① TV Connector kapsama alanı en fazla 15 m'dir.

Televizyonunuz ve ortamınız arasındaki ses dengesini ayarlama

İki işitme cihazı kullanırken TV'nin ses düzeyini ayarlamak için:

- Sağ kulağınızdaki işitme cihazının düğmesine basarak televizyonun sesini açar ve ortam sesini kısarsınız
- Sol kulağınızdaki işitme cihazının düğmesine basarak televizyonun sesini kısar ve ortam sesini açarsınız

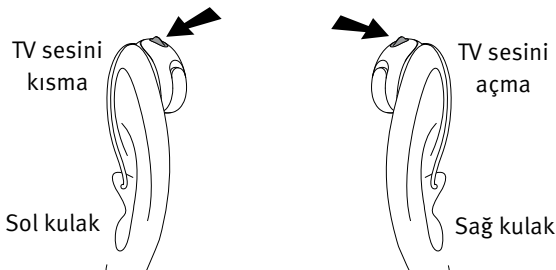

Bir işitme cihazı kullanırken TV'nin ses düzeyini ayarlamak için:

- İşitme cihazının düğmesine bastığınızda televizyonun sesini açar ve ortam sesini kısarsınız

TV Connector ve telefon çağrıları

İşitme cihazlarınız cep telefonunuza bağlıysa TV Connector'ı kullanırken bile telefon çağrıları almaya devam edebilirsiniz.

Gelen bir çağrı olması durumunda, işitme cihazları TV Connector'dan gelen ses sinyalini otomatik olarak durdurur ve işitme cihazlarında gelen çağrı uyarısı çalınır. Çağrı sonrasında işitme cihazları TV Connector ses sinyaline otomatik olarak geri döner.

Ses aktarımını kapatma

TV Connector'dan ses sinyali aktarımını sonlandırmak için TV'yi veya ses kaynağını kapatmanız yeterlidir. TV Connector otomatik olarak bekleme moduna girer ve işitme cihazları TV programından çıkar.

- ① TV'yi izlemeye (veya ses kaynağını dinlemeye) devam eden birisi varsa işitme cihazınızdaki düğmeleri kullanarak otomatik programa geri dönün. Bu seçeneğin işitme sağlığı bakım uzmanınız tarafından programlanması gerekir.

LED gösterge ışığını anlama

Sabit yeşil		Açık ve ses aktarılıyor
Sabit kırmızı		Bekleme modu
Yanıp sönen mavi		Bağlanma modu
Yanıp sönen kırmızı		Yanlış ses girişi biçimi (Dolby Digital veya DTS)

Sorun giderme kılavuzu

Neden

Olası çözüm

Sorun: ses kaynağından ses duyulmuyor, LED gösterge ışığı sabit kırmızı yanıyor

Ses kaynağı kapalı

Ses kaynağını açın

Kablolar TV Connector ve/veya ses kaynağına düzgün şekilde takılmamış

Tüm kabloların doğru konumda olduğundan ve sıkıca takıldığından emin olun. Bkz. “3. Adım: Ses kaynağına bağlama”

Ses kablosu, ses kaynağının AUDIO IN yuvasına takılmış

Ses kablosunun, ses kaynağı AUDIO OUT yuvasına takıldığından emin olun

Sorun: ses kaynağından ses duyulmuyor, LED gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönüyor

Yanlış ses girişi biçimi (Dolby Digital veya DTS) kullanılıyor

Ses kaynağınızın ses ayarlarında stereo (PCM) ses biçiminin kullanıldığından emin olun. Bunu yapmanız mümkün değilse analog 3,5 mm ses kablosunu kullanın.

Neden	Olası çözüm
Sorun: ses kaynağından ses duyulmuyor, LED gösterge ışığı sabit yeşil yanıyor	
TV Connector işitme cihazlarına bağlı değil	İşitme cihazlarınızı TV Connector'a bağlayın. Bkz. "4. Adım: TV Connector'ı işitme cihazlarınıza bağlama"
Ses kaynağı sessize alınmış	Ses kaynağını sessiz durumdan çıkarın veya ses düzeyini artırın
Sorun: LED gösterge ışığı mavi renkte yanıp sönüyor	
TV Connector bağlanma modunda	Bkz. "TV Connector'ı işitme cihazlarınıza bağlama"
Sorun: yayın sırasında duyulan ses düzeyi rahatsızlık veriyor (çok düşük veya çok yüksek)	
Farklı ses kaynakları, farklı çıkış ses düzeylerine sahiptir	Bkz. "Televizyonunuz ve ortamınız arasındaki ses dengesini ayarlama"


Neden	Olası çözüm
Sorun: TV Connector'ı bağladıktan sonra TV hoparlörlerinden ses gelmiyor	
TV'nin kulaklık bağlantısı seçilmiş	Hoparlörleri ve kullanılacak kulaklık bağlantısını aynı anda etkinleştirmek için TV'nin ses ayarlarını kontrol edin. Alternatif bir yol olarak, TV Connector'ı ses kaynağına bağlamak için analog 3.5 mm ses kablosu yerine optik (TOSLINK) kabloyu kullanın. Bkz. "İsteğe bağlı: Optik kablo ile bağlama"
Sorun: ses kaynağı hoparlörlerinden gelen ses, işitme cihazında yayınlanan sese göre gecikmeli geliyor	
Ses kaynağı hoparlörlerinin gecikme ayarı çok yüksek	Ses kaynağınızın ses ayarları menüsünden ses gecikme süresini ayarlayın (gecikmeyi azaltın)

Uyarılar

- ⚠ Cihaz 36 aydan küçük çocuklara yönelik değildir. Çocuklar tarafından yutulması durumunda boğulmaya neden olabilecek küçük parçalar içerir. Çocukların, bilişsel bozukluğu olan kişilerin ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Yutulması halinde hemen bir doktora veya hastaneye başvurun.
- ⚠ Yalnızca işitme sağlığı bakım uzmanınız tarafından sizin için özel olarak programlanmış işitme cihazlarını kullanın.
- ⚠ Bu cihazda Sonova AG tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler yapılamaz.
- ⚠ TV Connector manyetik alanlar oluşturabilir. TV Connector implante edilebilir cihazlarla (ör. kalp pilleri, defibrilatörler vb.) etkileşime girerse, TV Connector'ı kullanmayı bırakın ve doktorunuza ve/veya implante edilebilir cihazın üreticisine danışın.

- ⚠ Cihazın içinin açılması cihazda hasar oluşturabilir. Bu kullanıcı kılavuzunun sorun giderme bölümündeki çözüm yönergeleri izlenerek çözülemeyen sorunlar oluşursa işitme sağlığı bakım uzmanınıza başvurun.
- ⚠ Elektrikli bileşenleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın.
- ⚠ Cihazı patlayıcı alanlarda (madenler veya patlama tehlikesi bulunan endüstriyel alanlar, oksijen bakımından zengin ortamlar ya da yanıcı anestetiklerin işlendiği alanlar) veya elektronik ekipmanların yasak olduğu yerlerde kullanmayın.
- ⚠ Harici cihazlar yalnızca ilgili IECXXXXX standartlarına uygun şekilde test edilmiş olması durumunda bağlanabilir. Yalnızca Sonova AG tarafından onaylanmış aksesuarları kullanın.

⚠ Dikkat: elektrik çarpması. Fişi tek başına elektrik prizlerine takmayın.

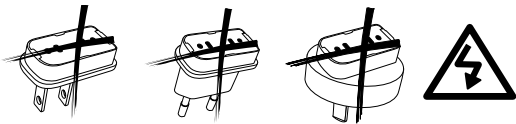

⚠ Güvenlik nedeniyle, yalnızca Sonova AG tarafından verilen şarj cihazlarını ya da 5 VDC dereceli stabilize şarj cihazlarını kullanın, min. 500 mA.

Ürün güvenliğiyle ilgili bilgiler

- ① Cihaz kablolarını, bağlantı noktalarını ve güç kaynağını kir ve birikintilerden koruyun.
- ① Cihazınızı, cihaza ait farklı kablolarla bağlarken aşırı kuvvet uygulamayın.
- ① Cihazı aşırı nem (banyo veya yüzme alanları) ve ısı kaynaklarından (radyatör, TV üstü) koruyun. Cihazı aşırı darbe ve titreşimlerden koruyun.
- ① Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Temizlemek için asla ev temizlik ürünleri (çamaşır

deterjanı, sabun vb.) veya alkol kullanmayın. Cihazı kurutmak için asla mikrodalga fırın veya diğer ısıtma cihazlarını kullanmayın.

- ① Röntgen ışınları, BT veya MRI taramaları cihazı bozabilir veya doğru çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ① Cihaz düşürülür veya hasar görürse, aşırı ısınır, hasarlı bir kablosu veya fişi varsa ya da sıvıya düşürülürse cihazı kullanmayı bırakın ve ısıtma sağlığı bakım uzmanınızla iletişim kurun.
- ① Yüksek güçlü elektronik ekipmanlar, büyük elektronik tesisatlar ve metalik yapılar, cihazın kapsama alanını bozabilir ve önemli ölçüde azaltabilir.
- ① Kabloyu TV'ye veya ses kaynağına ve TV Connector'a bağlarken optik TOSLINK kablodan gelen optik ışıktan gözlerinizi koruyun.

Bilgi ve sembol açıklamaları



CE sembolü, bu ürünün Radyo Ekipman Direktifi 2014/53/EU gerekliliklerini karşıladığına ilişkin Sonova AG onayıdır.



Bu sembol, kullanıcının bu kılavuzdaki ilgili bilgileri okuması ve dikkate alması gerektiğini gösterir.



Cihaz üreticisini ifade eder.



Bu sembol, kullanıcının bu kılavuzdaki ilgili uyarı bildirimlerine dikkat etmesi gerektiğini gösterir.



Kullanım ve ürün güvenliği için önemli bilgiler.

Çalışma koşulları

Bu cihaz, bu kullanıcı kılavuzunda aksi belirtilmedikçe amaca uygun kullanılması halinde sorunsuz veya kısıtlamasız çalışmak üzere tasarlanmıştır.



Taşıma ve saklama sıcaklığı:

-20° ila + 60° Santigrat
(-4° ila +140° Fahrenheit)

Çalışma sıcaklığı:

-0° ila + 40° Santigrat
(-32° ila +104° Fahrenheit)



Kuru tutun.



Cihaz, ürün etiketinde tanımlanan parametrelerle Doğrudan Akım (DC) güç kaynağına yönelik tasarlanmıştır.



Taşıma ve saklama sırasında nem: <%90 (yoğuşmasız).

Çalışma nemi: <%90 (yoğuşmasız).



Hava basıncı: 500 hPa ila 1500 hPa



Ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, ürünün diğer ev atıklarınızla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiği anlamına gelir. Ekipman atığını, kentsel atık sisteminden ayrı şekilde bertaraf etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Eski cihazınızın doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olumsuz olabilecek sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Easy Line

Easy Line, Sonova'nın ticari markasıdır.



Telif hakkı sembolü

Uyumluluk bilgileri

Uygunluk Bildirimi

Sonova AG işbu belgeyle bu ürünün Radyo Ekipman Direktifi 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tam metni üreticiden alınabilir.

Avustralya/Yeni Zelanda:



Bir cihazın, ilgili Radyo Spektrum Yönetimi (RSM) ve Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA) düzenlemelerine uygunluğunu ve Yeni Zelanda ile Avustralya'da yasal olarak satılabileceğini gösterir. R-NZ uygunluk etiketi, A1 uygunluk seviyesi altında Yeni Zelanda piyasasında satılan radyo özellikli ürünleri içindir.

Uyarı 1:

Bu cihaz, FCC Kuralları Kısım 15 ve Endüstri Kanada RSS-210 ile uyumludur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve
- 2) bu cihaz, istenmeyen kullanıma neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Uyarı 2:

Sonova AG tarafından açık onay alınmadan bu cihazda yapılan değişiklik veya düzeltmeler, cihazın kullanımına yönelik FCC yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyarı 3:

Bu cihaz test edilmiştir ve cihazın FCC Kuralları Kısım 15 ve Endüstri Kanada ICES-003 gereğince B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarıyla uyumlu olduğu ortaya konulmuştur.

Bu sınırlamalar, konut tesisatlarında zararlı girişime karşı makul düzeyde koruma sağlandığını göstermektedir. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir tesisatta girişim olmayacağına yönelik garanti yoktur. Bu cihaz, radyo ve televizyon alımında zararlı parazite neden olursa (ekipmanın kapatılıp tekrar açılmasıyla belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak girişimi gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya konumlandırın.
- Cihazla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Uyarı 4:

FCC/IC RF Radyasyona Maruz Kalma Açıklaması

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC/Industry Canada RF radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur.

Bu ekipman, verici ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulup çalıştırılmalıdır.

Bu verici, diğer anten veya vericilerle aynı ortamda konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyunuz
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez

Yerel garanti

Cihazınızı satın aldığınız işletme merkezinden ülkenin garanti şartları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Uluslararası garanti

Sonova AG, satın alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sınırlı uluslararası garanti sunmaktadır. Bu sınırlı garanti üretim ve malzeme hatalarını kapsar.

Garanti, yalnızca bir satın alma belgesi gösterilirse geçerlidir. Uluslararası garanti, tüketici ürünlerinin satışı ile ilgili geçerli ulusal mevzuat uyarınca sahip olabileceğiniz yasal hakları etkilemez.

Garanti sınırlaması

Bu garanti, yanlış kullanım veya bakım, kimyasallara maruz kalma veya gereğinden fazla basınca maruz kalma sonucu meydana gelen hasarları kapsamaz. Üçüncü şahısların veya yetkili olmayan servis merkezlerinin neden olduğu hasar, garantiyi geçersiz kılar. Bu garanti, bir işletme uzmanının kendi ofisinde yaptığı hizmetleri içermez.

Seri numarası (sol taraf):

Seri numarası (sağ taraf):

Satın alındığı tarih:

Yetkili işletme uzmanı (damga/imza):

Yetkili servis istasyonları ile yedek para malzemelerinin temin edilebileceęi yerlerin isim, adres ve telefon numaraları ve dięer eriřim bilgileri.

Duyu İ Anadolu / Millet Cad. Karadeniz arřısı No:33 K:1 Kayseri
/ +90 0352 2220629

Altınses İřitme / Güllük Cad. Özpınar Atasın Apt. No:85 K:1 D:9
Antalya / +90 242 2485379

Duysel / Saęlık Sokak, Opera Han 25 / 16-17 (The Marmara Oteli
Yanı) 34437 Taksim /İstanbul / +90 212 252 02 45

Cihazınıza yetkili servisler dıřında kesinlikle müdahale edilmemesine özen gösteriniz. Aksi taktirde cihazınız garanti kapsamı dıřında kalacaktır.

Tüketici Hakları

Malın ayıplı olduęunun anlařılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

a-Sözleşmeden dönme,

b-Satıř bedelinden indirim isteme,

c-Ücretsiz onarılmasını isteme,

-Satılanın ayıpsız bir misli ile deęiřtirilmesi isteme, haklarından birini kullanabilir.

Ek notlar



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland



İthalatçı Firma
Sonova Duyu Sistemleri İth.İhr.Tic.Paz.Ltd.Şti.
Cumhuriyet Cad. Kervansaray Apt. B Blok No:54
D:14 Harbiye-Şişli/İstanbul
Tel: +90 212 2326722
info.turkiye@unitron.com

